

NÁVOD K POUŽITÍ

Zdravotní pneumatická antidekubitní matrace s proměnlivým tlakem a pumpou

Modelová sestava

Trubicová matrace HF6002 a tlaková pumpa HF62012. Zdravotnický prostředek s označením CE.

Princip účinku

- Systém proměnlivého tlaku s odpovídající frekvencí pomáhá předcházet dlouhodobému tlaku na cévy, který může způsobit nedostatečné okysličení tkání.
- Systém změny tlaku umožňuje přizpůsobit matraci pacientovi a jeho poloze.

Pokyny k používání

Tradičně uznávanou metodou prevence proleženin je pravidelné polohování pacienta a pravidelná kontrola rizikových oblastí. Používání matrace s proměnlivým tlakem je doplněním této péče. Polohování a sledování pacienta je proto nutné podle potřeby nadále považovat za součást péče.

Určení

- Pro pacienty, kteří budou pravděpodobně trávit na lůžku více než 15 hodin denně.
- Pro pacienty se středním nebo vysokým rizikem vzniku proleženin.

Instalace a použití

1. Rozviňte matraci.
2. Umístěte matraci na lůžko.
3. Pomocí upevňovacích chlopní ji správně zajistěte na lůžku.
4. Pomocí háčků zavěste pumpu na rám lůžka na straně u nohou pacienta.
5. Propojte matraci s pumpou hadicemi a připojte je ke správným vývodům.
6. Připojte k pumpě napájecí kabel do příslušné zásuvky.
7. Zapojte napájecí kabel do elektrické sítě.
8. Stisknutím vypínače spusťte pumpu.
9. Před uložením pacienta vyčkejte, dokud nebude matrace zcela nafouknutá.
10. Nastavte tlak na odpovídající úroveň.

Důležité

Matrace je doplňkem antidekubitní péče. Nenahrazuje pravidelné polohování, kontrolu pokožky ani odborné doporučení zdravotnického pracovníka.

Bezpečnostní opatření

- Při obsluze elektrického zařízení postupujte opatrně.
- Nenechávejte výrobek připojený k elektrické síti, pokud se nepoužívá.
- Nevystavujte elektrické zařízení nadměrné vlhkosti.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, například průmyslové odmašťovače nebo octová rozpouštědla.
- Nepokoušejte se zařízení přemísťovat, pokud je připojeno k elektrické síti.

Každou závažnou příhodu související s výrobkem je nutné oznámit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel nebo pacient bydliště.

Čištění a dezinfekce - pumpa

Upozornění

Před zahájením čištění odpojte zařízení od elektrické sítě.

Používejte hadřík navlhčený slabým roztokem čisticího prostředku. Dodržujte koncentrace roztoků doporučené jejich výrobcem a před použitím čisticího roztoku respektujte pokyny výrobce.

K čištění použijte hadřík navlhčený roztokem čisticího prostředku s označením CE nebo dezinfekčního prostředku. Dodržujte koncentraci a dobu působení doporučenou výrobcem daného prostředku.

Údržba

Údržbu pumpy smí provádět pouze technik pověřený a proškolený dovozcem.

Technické údaje

Matrace HF6002 Max. hmotnost uživatele: 135-145 kg Rozměry: 200 x 90 x 11,5 cm Materiál: PVC, tloušťka 0,45 mm Barva: béžová Hmotnost: 5,5-6,5 kg Počet komor: 18 Záruka: 18 měsíců	Pumpa HF62012 Výstup vzduchu: 5-7 l/min Rozsah tlaku: 50-120 mmHg Napájení: 220 V / 50 Hz Ochrana: třída II Pojistka: 1 A Příkon: 7 W Rozměry: 23,5 x 12 x 9,5 cm Záruka: 18 měsíců
---	--

Výrobce, zástupce v EU a dovozce

Výrobce FOSHAN HONGFENG CO., LTD No. 4-2 Leqiang Road, Leping, Sanshui, Foshan District, Guangdong Province, China	Zplnomocněný zástupce v EU MedNet EC-REP GmbH Borkstrasse 10 48163 Münster, Germany
Dovozce Reha Fund Sp. z o.o. ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polsko info@rehafund.pl www.rehafund.pl	Poznámka k překladu Tento dokument je českým překladem polského návodu výrobce. Při nejasnostech má přednost originální dokumentace dodaná s výrobkem.